

Technische Information

Technical information



Aktivierung der Poren bei SoftSkin Air®

Activation of the micro-pores at SoftSkin Air®

Alle Linermodelle der Reihe SoftSkin Air® besitzen im Material eingearbeitete Mikroporen, die Feuchtigkeit oder Luft von der Stumpfhaut nach außen leiten. Bei einem neu eingesetzten Liner kann es vorkommen, dass dieses anfänglich nicht funktioniert.

Die Ursache liegt in der von Natur aus hohen Haftungsneigung des Silikonmaterials. Die Lagerdauer der Liner von der Fertigung bis zur Anwendung am Patient kann zu einem Verkleben der Poren führen.

Durch Einfüllen von Wasser können Sie unkompliziert testen, ob durch die Mikroporen Feuchtigkeit nach außen dringt. (siehe Punkt 4 der Anleitung)

All SoftSkin Air® liner models have micro-pores in the silicone material to transport moisture and/or air away from the skin. With a newly used liner, it may happen that this initially does not work properly.


The cause lies in the inherently high adhesion tendency of the silicone material. The storage period of the liners from production to application on the patient can lead to closing of the micro-pores by the sticking habits of the silicone.

By pouring water in the liner, you can easily test whether moisture penetrates through the micro-pores. (see point 4 of the manual)


Vorgehensweise zur Aktivierung / Activation procedure:



1. Rollen Sie den Liner mehrfach von verschiedenen Seiten auf den Linerständer.
Roll the liner several times from different sides onto the liner stand.

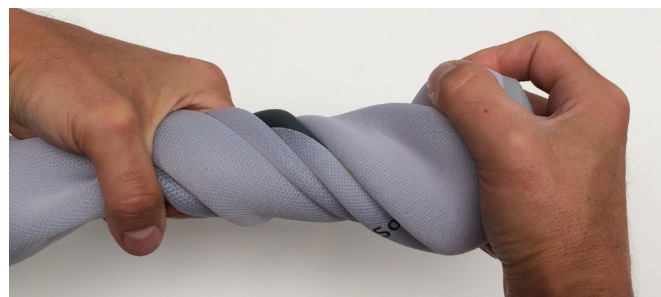

2. Verwinden Sie den Liner mehrfach in wechselnder Richtung.
Twist the liner several times in alternating directions.

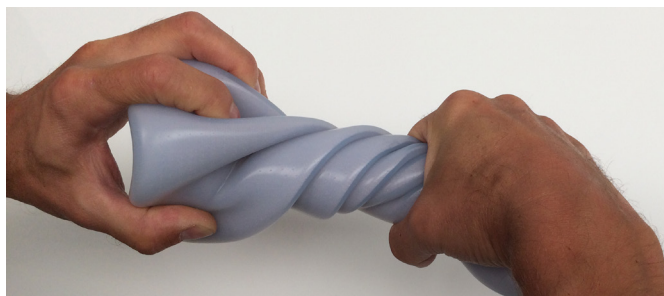

3. Drehen Sie die Innenseite des Liners nach außen und verwinden Sie den Liner mehrfach in wechselnder Richtung.
Turn the inside of the liner outward and twist the liner several times in alternating directions.



4. Füllen Sie den Liner bis max. zur Hälfte mit Wasser. Rollen Sie das obere Ende des Liners dicht ein bis Druck auf das eingeschlossene Wasser entsteht.
Fill the liner half (maximum) with water. Roll the upper end to close the liner until pressure occurs on the trapped water.



5. Bei erfolgreicher Aktivierung der Mikroporen treten Wasserperlen an der Außenseite aus.
With successful activation of the micro-pores, water drops will leak on the outside.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie weitergehende Fragen?
Wenden Sie sich an unseren Uniprox-Kundenservice:
0800 - 001 05 40 (kostenfrei innerhalb Deutschlands)

*Do you need more assistance or do you have further questions?
Please contact International Customer Service:
+49 36628 - 66 33 70*

unique prosthetic solutions

A company of the Bauerfeind Group _ www.uniprox.de

 uniprox®